

Návod k použití - HistoFor BFS

Identifikace: HistoFor BFS je 4% roztok formaldehydu, hodnota pH cca 7. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě. Výrobek je určen pro jedno použití. Tento výrobek je určen jen pro profesionální použití.

Rozsah použití: HistoFor BFS je určen k fixaci a transportu biologického materiálu.

Návod k použití: Odebrané tkáně ponořte do nádoby s fixačním roztokem HistoFor BFS, kterého musí být 10-20x více, než je objem fixované tkáně. Tkáně musí být volně vloženy do nádoby a zcela ponořené v roztoku. Důležité je, aby nádoby byly řádně uzavřené a nedošlo k unikání formalínu. Potřísnění formalínem může vést k úplné ztrátě čitelnosti štítku.

Skladování a likvidace:

Skladujte při teplotě 15-25°C. Chraňte před přímým slunečním světlem

Postup při nehodě:

V případě rozlití zabraňte vniknutí obsahu do kanalizace a odpadních vod. Obsah zasypte savým materiálem, např. pískem, suchou zeminou a shromážděte do krytých kontejnerů a nechte zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Znečištěné předměty a podlahu důkladně očistěte.

Obal zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody. Po osušení použít reparační krém. V případě podráždění pokožky, vyhledat lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení. Při potížích vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou vodou, zasažené oko široce otevřené od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min. 15 minut. Při přetrvání obtíží vyhledat lékařskou pomoc.

Bezpečnostní upozornění:



Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

www.histoform.cz